

CON CELBREA® ESTOY EN CONTROL

UNA INNOVACIÓN
PARA LA DETECCIÓN
TEMPRANA DE
ENFERMEDADES
DEL SENO




celbrea®
INDICADOR DE ACTIVIDAD TÉRMICA EN LOS SENOS

UN GRAN AVANCE PARA LA SALUD DE LOS SENOS

SABÍA QUE...

Un aumento en la temperatura de la superficie de los senos puede indicar la existencia de una enfermedad subyacente. Incorpore el uso de Celbrea® a su chequeo rutinario.

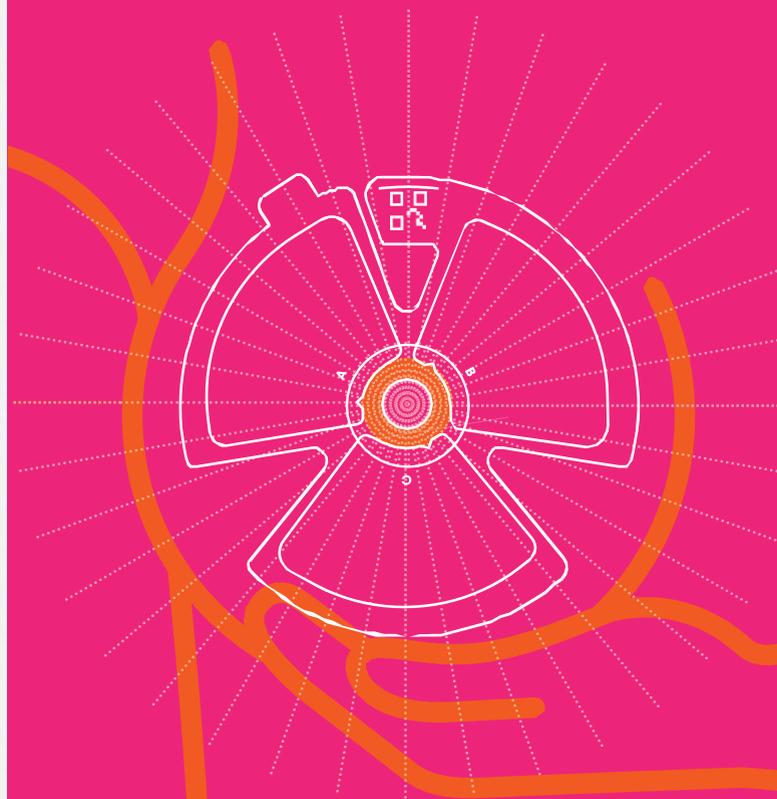

PRESENTANDO A CELBREA®

El dispositivo Celbrea® utiliza más de mil microsensores capaces de detectar diferencias en la temperatura de la superficie de los senos. Al medir esas diferencias, Celbrea® contribuye a la detección de enfermedades mamarias potenciales, incluyendo cáncer de seno. La identificación temprana de cualquier tumor conlleva un índice de supervivencia de casi el 100%.

celbrea®

INDICADOR DE ACTIVIDAD TÉRMICA EN LOS SENOS

Visite celbreachile.cl
para obtener más
información

Celbrea® es un indicador de actividad térmica para ser usado por médicos como un complemento al chequeo físico habitual, incluyendo la palpación, mamografía y otros procedimientos establecidos para la detección de enfermedades del seno.

Celbrea® es un dispositivo médico Clase I autorizado por la FDA y el ISP disponible en el mercado. Solo un médico puede interpretar o dar recomendaciones sobre los resultados de Celbrea®. Celbrea® no diagnostica el cáncer de seno ni reemplaza la mamografía u otros procedimientos diagnósticos.

Si tiene alguna pregunta con respecto a Celbrea® consulte a su médico o contacte a celbreachile.cl o contactocelbrea@comercys.cl. Para más información sobre Celbrea®, visite www.celbreachile.cl.

CELBREA®. TECNOLOGÍA DISEÑADA PARA MUJERES DE TODAS LAS EDADES


Los parches autoadhesivos de Celbrea® permiten controlar proactivamente la salud de los senos de una manera rápida, asequible y sin dolor.

FÁCIL DE USAR

Busque un lugar cómodo a temperatura ambiente. Limpie el área del seno para que esté completamente libre de lociones, cremas, aceites, desodorante y exceso de sudor. Es importante evitar el ejercicio 30 minutos antes de usar Celbrea® así como asegurar que la temperatura corporal no esté demasiado fría.

Pregunte hoy a su médico sobre Celbrea® o visite celbreachile.cl para obtener más información.

- Rápido – 15 minutos
- Seguro
- No invasivo
- Sin radiación
- Sin luz infrarroja
- Resultado inmediatos

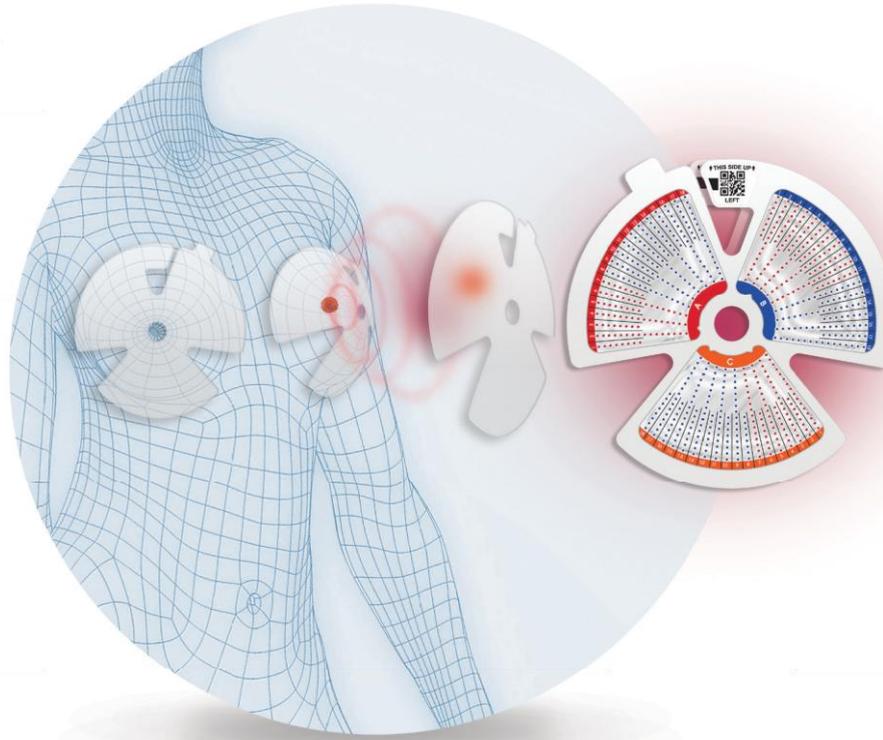

PASO 1

Retire la capa protectora. Identifique el parche DERECHO y el IZQUIERDO.



PASO 2

Coloque el pezón en medio del agujero del parche, el código QR debe quedar sobre la parte superior central del seno. Aplique los parches firmemente sobre sus senos, asegurándose de que no queden pliegues o arrugas.



PASO 3


Colóquese un brasier deportivo o de cobertura completa sobre los parches. Siéntese cómodamente por 15 minutos.



PASO 4

Retire los parches suavemente para proceder al registro de los resultados.

LAS MUJERES QUE PUEDEN BENEFICIARSE ESPECIALMENTE CON EL USO DEL DISPOSITIVO CELBREA® SON:

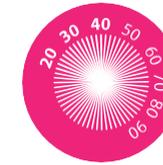

Mujeres jóvenes (menores de 40 años) que están preocupadas por la salud de sus senos y normalmente están fuera de las guías médicas para el monitoreo de los senos.



Mujeres con un historial clínico familiar de cáncer de seno o aquellas que necesitan un número adicional o más frecuente de exámenes o citas de seguimiento.



Mujeres con tejido mamario denso, quienes requieren revisiones más completas debido a que presentan un mayor riesgo de cáncer de seno.

celbrea®

INDICADOR DE ACTIVIDAD TÉRMICA EN LOS SENOS

Visite celbreachile.cl para obtener más información